

Портфель BD Micro-Fine Plus

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2024



embecta, в прошлом подразделение BD, представляет собой компанию, специализирующуюся на здоровье и благополучии пациентов с сахарным диабетом.



Мы — новая, публичная компания, обладающая обширным опытом в области лечения диабета, который берет свое начало в 1924 году, когда BD представила первый в мире инсулиновый шприц⁽¹⁾.



Уже почти столетие мы успешно работаем на рынке изделий для введения инсулина. Сегодня нашими продуктами пользуется около 30 миллионов пациентов более чем в 100 странах⁽²⁾.



Наша цель состоит в том, чтобы однажды создать мир, в котором диабет не будет влиять на качество жизни. Для этого мы разрабатываем и делаем доступными решения, облегчающие жизнь пациентам с диабетом

Примечания:

(1) Heinemann L, Nguyen T, Bailey TS, et al. Needle Technology for Insulin Administration: A Century of Innovation. Journal of Diabetes Science and Technology. Декабрь, 2021.

(2) Неопубликованные данные. Рыночная модель по данным embecta, 2021

embecta, в прошлом подразделение BD. BD — производитель рекламируемой нами продукции.

Наименование embecta и ее логотип — товарные знаки компании «Эмбекта Корп». BD и логотип BD являются товарными знаками компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. © 2023 г., Embecta Corp. Все права защищены.

Для специалистов Здравоохранения

На сегодняшний день мы являемся одной из крупнейших компаний, нацеленных на борьбу с диабетом



> 7 млрд

единиц продукции производится каждый год⁽¹⁾



3

производственных площадки в разных частях земного шара позволяют нам обеспечивать клиентов высококачественной, безопасной и надежной продукцией⁽¹⁾



~ 30 млн

пациентов с диабетом по всему миру пользуются нашей продукцией



> 100

стран используют нашу продукцию в борьбе с диабетом



2000 +

неравнодушных сотрудников, стремящихся к инновациям и совершенствованию стандартов лечения диабета по всему миру

Примечания:

(1) Неопубликованные данные. Объем производства по данным embecta, 2021

embecta, в прошлом подразделение BD. BD — производитель рекламируемой нами продукции. Наименование embecta и ее логотип — товарные знаки компании «Эмбекта Корп». BD и логотип BD являются товарными знаками компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. © 2023 г., Embecta Corp. Все права защищены. Для специалистов здравоохранения

Компания embecta продолжает задавать стандарты по введению инсулина, демонстрируя в своем портфолио широкий спектр изделий

Шприцы инсулиновые одноразовые BD Micro-Fine Plus¹



Иглы для шприц-ручки одноразового использования BD Micro-Fine Plus²



Иглы для шприц-ручки BD Micro-Fine Plus с пятигранной заточкой по технологии Penta Point³



Иглы безопасные для шприц-ручки BD AutoShield Duo⁴



1. РY № ФСЗ 2012/12480 РY № ФСЗ 2011/09169 РY № ФСЗ 2008/02602
2. РY № ФСЗ 2008/02601 РY № ФСЗ 2011/11175
3. РY № РЗН 2022/18053
4. РY № РЗН 2017/5743

embecta, в прошлом подразделение BD. BD — производитель рекламируемой нами продукции.
Наименование embecta и ее логотип — товарные знаки компании «Эмбекта Корп». BD и логотип BD являются товарными знаками компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. © 2023 г., Embecta Corp. Все права защищены.
Для специалистов здравоохранения

Внутримышечная инъекция – это опасно. Подумайте о риске случайной внутримышечной инъекции.


Влияние длины иглы на вероятность выполнения инъекции в мышцу




**В/М ИНЪЕКЦИЯ
6 РАЗ В НЕДЕЛЮ**



**1 В/М ИНЪЕКЦИЯ
ЧЕРЕЗ ДЕНЬ**

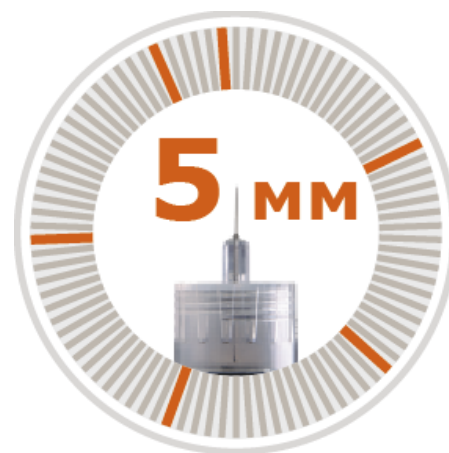

**1 В/М ИНЪЕКЦИЯ
В 17 ДНЕЙ**

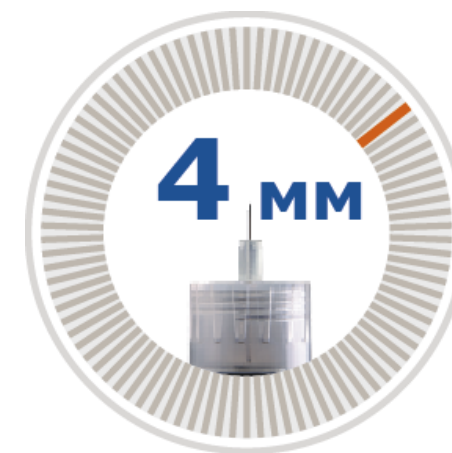

**1 В/М ИНЪЕКЦИЯ
В 83 ДНЯ**

¹ Gibney MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for injectable therapy. injections: Implications for needle length recommendations. In press. Curr Med Res Opin.


embecta, в прошлом подразделение BD. BD — производитель рекламируемой нами продукции.

Наименование embecta и ее логотип — товарные знаки компании «Эмбекта Корп». BD и логотип BD являются товарными знаками компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. © 2023 г., Embecta Corp. Все права защищены.
Для специалистов Здравоохранения

Выбор длины иглы. Толщина кожи в местах инъекций¹


- За исключением особых ситуаций, **инсулин вводится только в подкожно-жировую клетчатку.**
- Внутримышечных (В/М) и внутрикожных инъекций инсулина следует избегать.
- Подкожно-жировая клетчатка ограничена кожей (эпидермис и дерма) с одной стороны, фасцией и мышцей с другой.

Толщина кожи

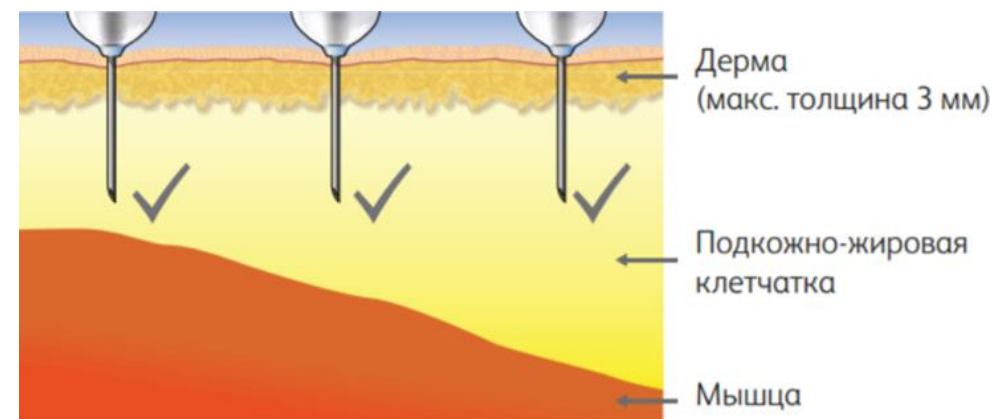

Более короткие иглы безопаснее, а их применение, как правило, менее болезненно.

Иглы для шприц-ручек различной длины

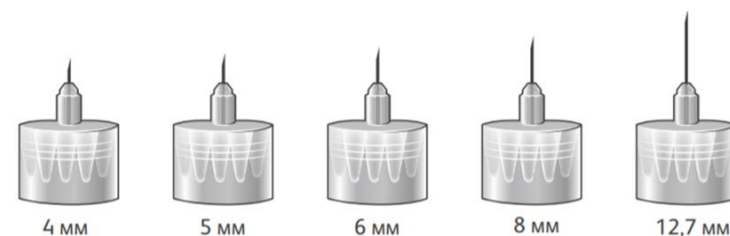

¹ Майоров А.Ю., Мельникова О.Г., Котешкова О.М., Мисникова И.В., Черникова Н.А. Техника инъекций и инфузии при лечении сахарного диабета. Методическое руководство. 2018, Издательство ООО «АРТИНФО», г. Москва.

embecta, в прошлом подразделение BD. BD — производитель рекламируемой нами продукции.

Наименование embecta и ее логотип — товарные знаки компании «Эмбекта Корп». BD и логотип BD являются товарными знаками компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. © 2023 г., Embecta Corp. Все права защищены.

Для специалистов здравоохранения

Варианты исполнения игл для шприц-ручек для одноразового использования

Иглы отличаются по длине и диаметру

BD
Micro-Fine Plus

0,23 мм (32G) x 4 мм*



#320520

0,25 мм (31G) x 5 мм**



#320590

0,25 мм (31G) x 6 мм*



#320736

0,30 мм (30G) x 8 мм**



#320519

Novo Nordisk
НовоФайн®¹



НовоФайн®
0,25 мм (31G) x 6 мм

НовоФайн®
0,30 мм (30G) x 8 мм

* РУ №ФСЗ 2011/11175

** РУ №ФСЗ 2008/02601

¹ <http://www.novonordisk.ru/production/needles-novofine.html>

embecta, в прошлом подразделение BD. BD — производитель рекламируемой нами продукции.

Наименование embecta и ее логотип — товарные знаки компании «Эмбекта Корп». BD и логотип BD являются товарными знаками компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. © 2023 г., Embecta Corp. Все права защищены.

Для специалистов здравоохранения

NEW! Игла для шприц-ручки BD Микро-Файн Плюс® с пятигранной заточкой по технологии PentaPoint®, стерильная, одноразового использования

Иглы отличаются по длине и диаметру

0,23мм (32G) x 4мм*



#320497

0,25 мм (31G) x 5 мм*



#320498

0,30 мм (30G) x 8 мм*



#320499

Совместимы с большинством шприц-ручек и инъекторов для введения инсулина, используемых в Российской Федерации**

* РУ № РЗН 2022/18053

** См. Инструкцию по применению на МИ

embecta, в прошлом подразделение BD. BD — производитель рекламируемой нами продукции.

Наименование embecta и ее логотип — товарные знаки компании «Эмбекта Корп». BD и логотип BD являются товарными знаками компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. © 2023 г., Embecta Corp. Все права защищены.

Для специалистов Здравоохранения

NEW! Игла для шприц-ручки BD Микро-Файн Плюс® с пятигранной заточкой по технологии PentaPoint®¹


В отличие от стандартных игл с трёхгранной заточкой, иглы по технологии PentaPoint® имеют пять углов заточки. Пятигранная заточка облегчает прохождение иглы через ткани, что позволяет снизить болевые ощущения пациента при инъекции.

Больше граней для
большего комфорта^{2*}

Инъекции стали
удобнее^{2*}

Пациенты
подтверждают
преимущества^{2*}

3 варианта
исполнения¹

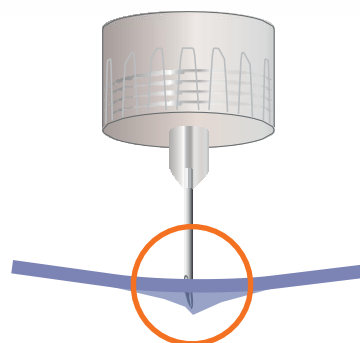

Удобнее использовать
62% пациентов

Легче вводить иглу
63% пациентов

Предпочтительный выбор
пациентов с СД
61% пациентов



0,23мм (32G) x 4мм
SKU 320497



0,25мм (31G) x 5мм
SKU 320498



0,25мм (31G) x 8мм
SKU 320499

* в сравнении с иглами с 3-гранной заточкой

¹ РУ РЗН 2022/18053

² Hirsch L, Gibney M, Berube J, Manocchio J. Impact of a Modified Needle Tip Geometry on Penetration Force as well as Acceptability, Preference, and Perceived Pain in Subjects with Diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2012;6(2):328-335.



ИНСУЛИНОВЫЕ ШПРИЦЫ*

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

BD Micro-Fine Plus - 9 вариантов исполнения



U-100

U-40

1 мл, шаг 2 ЕД

0,25 мм (31G) x 6 мм
#324905***

0,30 мм (30G) x 8 мм
#320929*

0,33 мм (29G) x 12,7 мм
#320909*

0,5 мл, шаг 1 ЕД

0,25 мм (31G) x 6 мм
#324904***

0,30 мм (30G) x 8 мм
#320930*

0,33 мм (29G) x 12,7 мм
#320921*

0,3 мл, шаг 0,5 ЕД

0,30 мм (30G) x 8 мм
#320829**



DEMI – возможность введения минимальных доз

1 мл, шаг 1 ЕД

0,30 мм (30G) x 8 мм
#320911*

0,33 мм (29G) x 12,7 мм
#320910*



DEMI – версия инсулиновых шприцев с самым аккуратным в линейке BD Micro-Fine Plus шагом дозирования 0,5 ЕД

! Шприцы U-100 и U-40 не взаимозаменяемы



*РУ №ФСЗ 2008/02602
**РУ №ФСЗ 2011/09169
***РУ №ФСЗ 2012/12480

embecta, в прошлом подразделение BD. BD — производитель рекламируемой нами продукции. Наименование embecta и ее логотип — товарные знаки компании «Эмбекта Корп». BD и логотип BD являются товарными знаками компании «Бектон, Дикинсон энд Компани». Все остальные товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. © 2023 г., Embecta Corp. Все права защищены. Для специалистов здравоохранения



Упаковка

100 шт./ групповая упаковка – 10 штук/индивидуальная упаковка

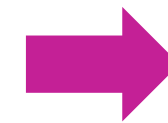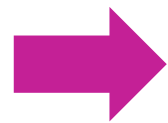

Каждый инсулиновый шприц BD Micro-Fine Plus поставляется стерильным внутри. Стерильность внутри обеспечивается при помощи защитного колпачка иглы и колпачка поршня

Мы разрабатываем подробные образовательные материалы по различным направлениям в области лечения диабета


Помощь в создании рецензируемых образовательных материалов для МР

Передовая доказательная клиническая практика



Образовательные материалы, нацеленные на диалог с пациентом

Набор материалов для консультации пациентов

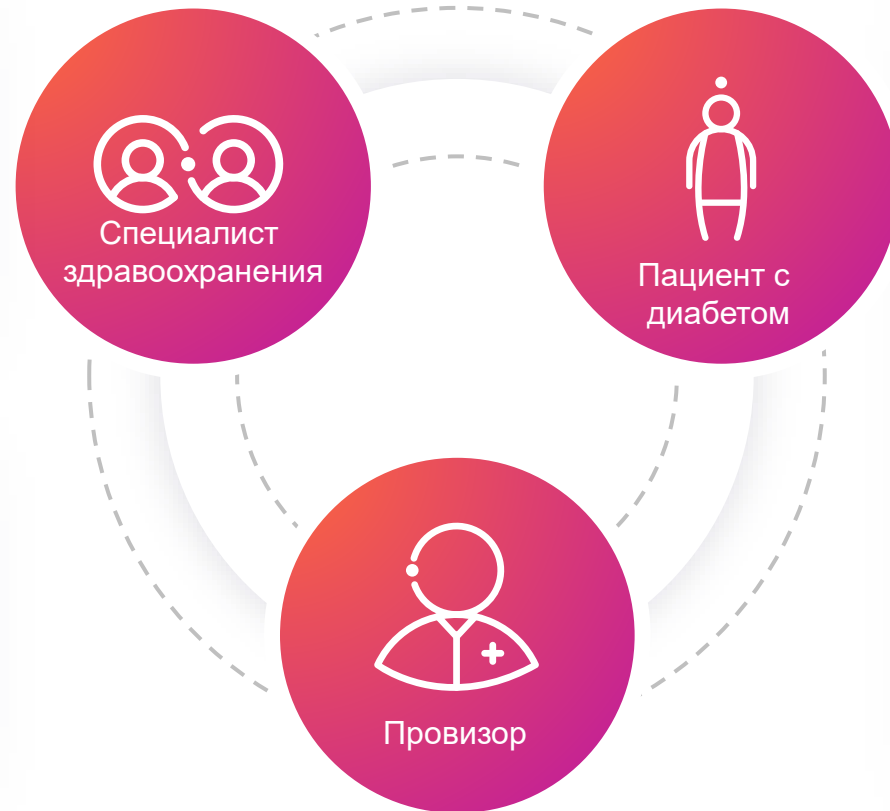

Образовательные инструменты по технике инъекций для пациентов

Инструменты вовлечения



BD и Я – новая платформа, обучающая технике инъекций
bdandme.us.bd.com

Информационные материалы по лечению диабета



Спасибо за
внимание!



ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ